

Information patient

BEGO PMMA Splint et
BEGO PMMA Splint E –
Gouttière occlusale

Chère patiente, Cher patient,

Vous trouverez ci-après des conseils utiles pour l'utilisation, l'entretien, le nettoyage et le stockage de votre gouttière occlusale.

La gouttière occlusale est adaptée à vos besoins personnels et est biocompatible.

Veillez porter votre gouttière :

La nuit

Toute la journée

Nous vous souhaitons une bonne réussite pour votre traitement !

L'équipe de votre cabinet dentaire se tient à votre disposition pour toute question supplémentaire.

Information importante

Le port régulier de la gouttière peut entraîner des altérations fonctionnelles (par ex. ternissure/coloration ou traces d'abrasion notables). Dans ce cas, une nouvelle gouttière ou sa réparation peuvent s'avérer nécessaires.

L'examen de l'état de la gouttière doit être réalisé dans le cadre de votre traitement par un contrôle régulier au cabinet dentaire.



Veillez observer les instructions suivantes pour garantir la fonction durable de votre gouttière :



Utilisation

Avant la mise en place de la gouttière :

- Brossez-vous les dents
- Rincez soigneusement la gouttière à l'eau froide

Pendant le port de la gouttière :

- Ne consommez pas d'aliments ni de boissons pour éviter tout risque de cassure de la gouttière

Facultatif :

- Pour augmenter le confort lors de l'insertion de gouttière, celle-ci peut être placée au préalable dans de l'eau chaude



Entretien et nettoyage

Après avoir porté la gouttière :

- Rincez soigneusement la gouttière à l'eau froide et nettoyez les faces internes et externes avec une brosse à dents



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
Veillez éviter le nettoyage avec

- Du dentifrice ou des nettoyeurs de prothèse dentaire
- Des produits nettoyants avec des colorants, par ex. solution pour bain de bouche
- Des produits nettoyants ménagers ou des produits abrasifs
- De l'eau bouillante
- Des appareils à ultrasons et des procédés de nettoyage qui dépassent les 35°C



Stockage

Entre les cycles de port, la gouttière doit être conservée dans un endroit sec à l'abri de la lumière, à température ambiante ou dans de l'eau froide. Vous pouvez conserver la gouttière d'occlusion dans la boîte en plastique BEGO (sans mousse) qui vous a été remise. Pour éviter une accumulation accrue de germes, veuillez vous assurer que la gouttière d'occlusion reste sèche pendant le stockage ou qu'elle est rincée avant d'être portée.



Cachet du chirurgien-dentiste

www.bego.com

BEGO France

35 Rue Jules Guesde · 69100 VILLEURBANNE, France

Tel. 04 72 34 33 35 · Fax 04 72 68 90 96

E-mail france@bego.com · www.bego.com

Hotline 09 70 24 85 89 · hotline-fr@bego.com

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany

Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100

E-mail info@bego.com · www.bego.com

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany

Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174

E-mail info@bego-medical.com · www.bego.com